

Сфокусируйтесь на здоровье
пациентов – с остальным поможет



УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАНЫ



ALFAMEDEX.RU

КАТАЛОГ




УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАНЫ




Предназначены для расширения поля доступа, защиты раны от травм и снижения риска занесения инфекции в рану при проведении эндоскопических и открытых хирургических операций.


Способ применения

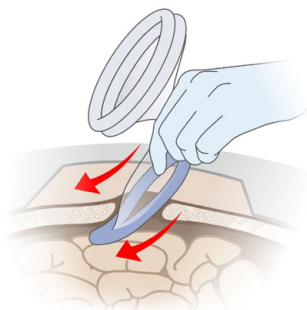


Согните и поместите гибкое синее кольцо в полость операционной раны

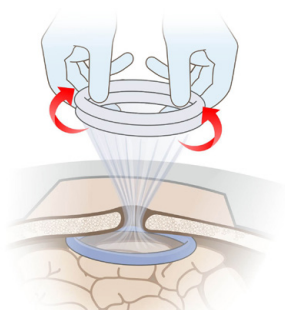

Выворачивая белое кольцо «внутрь», создайте операционное поле

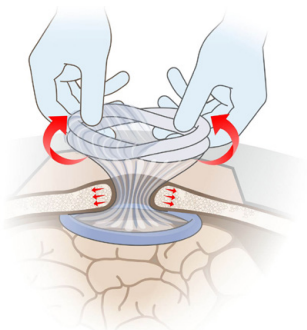

Убедитесь в правильной постановке устройства в ране

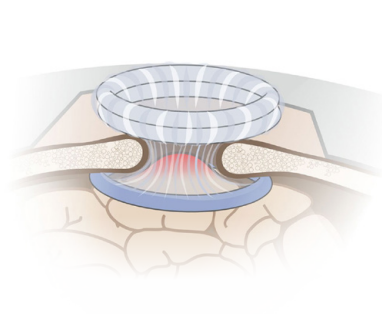

Совершите необходимые манипуляции в готовом операционном поле

- ✓ Гибкие кольца устройств позволяют регулировать их под рану, создавая операционное поле с максимальным комфортом для специалиста.
- ✓ Мягкая конструкция изделий снижает риск травмирования тканей, что в свою очередь, уменьшает послеоперационные боли, помогая пациенту ускоренно восстанавливаться.
- ✓ Регулируемая длина кожуха устройств позволяет моделировать его под индивидуальный случай, в том числе в бариатрической практике.
- ✓ Округлая форма изделия обеспечивает равномерную бережную ретракцию при его установке, создавая максимальную обзорность и манёвренность в ходе операции.

Устройства для защиты раны

С регулируемой длиной рукава



УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАН
С РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЛИНОЙ РУКАВА



- ✓ Уменьшают вероятность контаминации тканей и защищают их от пересушивания во время операции, помогая пациенту быстро восстанавливаться.
- ✓ Равномерная ретракция со сниженным риском повреждения соседних тканей и органов позволяет проводить манипуляции безопасно.
- ✓ Стерильные медицинские изделия для однократного применения.

Размерный ряд

REF	Размер устройства, мм	Высота рукава, мм	Размер раны, мм	Кодировка	Упаковка (инд./тр.)
1839-5-V50-60T-150	50 x 60	150	20–40	XS	5/100
1839-5-V80-90T-150	80 x 90	150	30–60	S	5/100
1839-5-V120-130T-150	120 x 130	150	50–100	M	5/25
1839-5-V150-160T-250	150 x 160	250	80–130	L	5/40



Альфамедэкс